

OBLIČEJOVÝ RESPIRÁTOR FFP2 (KN95)

NÁVOD K POUŽITÍ

Postup při použití

1. Před nasazením respirátoru si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem nebo dezinfekcí na bázi alkoholu.
2. Respirátor vyjměte opatrně z obalu, nedotýkejte se vnitřní strany.
3. Přiložte k obličeji, nosním obloučkem nahoru, gumičky natáhněte za uši.
4. Tvarovatelný nosní oblouček zatlačením vytvarujte kolem nosu a zkontrolujte těsnost.
5. Při nošení na respirátor nesahejte rukama.

Údržba

1. Tento respirátor je určený pro jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně. Neperte a nečistěte.
2. Respirátor vyměňte po 4 až 8 hodinách, v případě navlhnutí i dříve.
3. Při sundávání se nedotýkejte masky respirátoru, sejměte ho pouze za gumičky.
4. Respirátor po každém použití vyhodte do uzavřeného koše a umyjte si ruce vodou a mýdlem nebo dezinfekcí na bázi alkoholu.

Skladování

1. Skladujte v suchém a dobře větraném prostoru mimo dosah slunečního záření.
2. Chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.

Upozornění

1. Nejedná se o hračku pro děti.
2. Udržujte mimo dosah dětí.